

INSTRUCCIONES DEL KIT DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS NASALES

testandgo
DESARROLLADO POR LTS

Lea atentamente todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones puede dar lugar a resultados incorrectos.

Para uso por personas mayores de 14 años (autodiagnóstico) o 5 años o más (autorecogido bajo la supervisión de un adulto), o 2 años o más (recogido con la asistencia de adultos).

SOLO autorizado para uso con receta, pruebas de diagnóstico in vitro (DIV) y uso de emergencia.

Preguntas: Póngase en contacto con nosotros en testandgo.com o llame al (800) 402-0000.

ANTES DE DEVOLVER EL KIT, CONFIRME LO SIGUIENTE:

- ✓ **EL KIT ESTÁ ACTIVADO.** La muestra no se puede procesar si no está activada.
- ✓ La **FECHA DE NACIMIENTO** y las **INICIALES** están escritas en la etiqueta del tubo.
- ✓ **EL TUBO ESTÁ SELLADO** en la bolsa de muestras provista con la almohadilla absorbente.
- ✓ La muestra debe entregarse el **MISMO DÍA** que se toma.

CONTENIDO DEL KIT




PAQUETE DEL KIT



HISOPO



TUBO

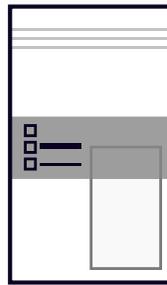

BOLSA DE MUESTRAS CON ALMOHADILLA ABSORBENTE



ETIQUETA DEL TUBO CON CÓDIGO QR



TOALLITAS DESINFECTANTES




BOLÍGRAFO

INSTRUCCIONES DEL KIT

1 Active el kit

- Escanee el código QR que se encuentra en la etiqueta del tubo del kit.
- Si no puede escanear la etiqueta, llame a nuestra línea de ayuda para completar este paso: 800-402-0000.

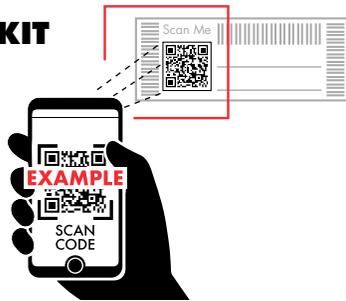

2 Proceso para la entrega de la muestra

- La muestra **DEBE** entregarse el mismo día en que se recoge.
- Las muestras entregadas demasiado tarde no serán procesadas.

3 Suéñese la nariz y límpiense las manos


Para obtener una muestra adecuada, es importante que la nariz esté despejada y que las manos estén limpias.

- Con un pañuelo limpio, suéñese suavemente la nariz y retire cualquier residuo para despejar ambas fosas nasales. *Si se encuentra cerca de otras personas, suéñese la nariz en una zona privada.*
- Cualquier persona que toque el material debe lavarse las manos. Use desinfectante, toallitas desinfectantes o lávese las manos con agua tibia y jabón durante 20 segundos, y séquelas bien con una toalla limpia.



4 Abra el paquete del hisopo nasal

- Retire el hisopo nasal del envoltorio separando los dos extremos (como lo haría para abrir un apósito).
- **Asegúrese de tocar únicamente el mango del hisopo, no la punta.**

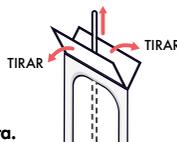

5 Introduzca el hisopo en ambas fosas nasales


Nota: El hisopado de menores de 5 años debe realizarlo un adulto.

- Introduzca suavemente la punta **completa** del hisopo en una fosa nasal hasta que sienta resistencia.
- Introduzca el hisopo **menos de una pulgada** en adultos y menos de **media pulgada** en niños pequeños.
- Ejerciendo una presión media, pase lentamente el hisopo con un movimiento circular alrededor de la pared interior de la fosa nasal **cuatro (4) veces**.
- La punta del hisopo debe tocar la pared interior de la fosa nasal en cada rotación.
- Repita el mismo proceso con el **mismo hisopo** en la **otra fosa nasal**.



6 Introduzca el hisopo en el tubo


- Abra el tubo mientras **sostiene el hisopo**.
- Introduzca **primero la punta** del hisopo en el tubo.
- **Enrosca bien** la tapa.

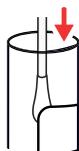

7 Complete la etiqueta

El laboratorio solo puede procesar las muestras si la etiqueta contiene la información correcta.

- (1) Escriba las **iniciales** y la **fecha de nacimiento** de la persona a la que se toma la muestra en la etiqueta del tubo.
- (2) Coloque la etiqueta en el tubo de la manera que se indica.
- (3) Coloque el tubo en la bolsa de muestra y cierre la parte superior de la bolsa de forma segura. Deje el blanco almohadilla en la bolsa.

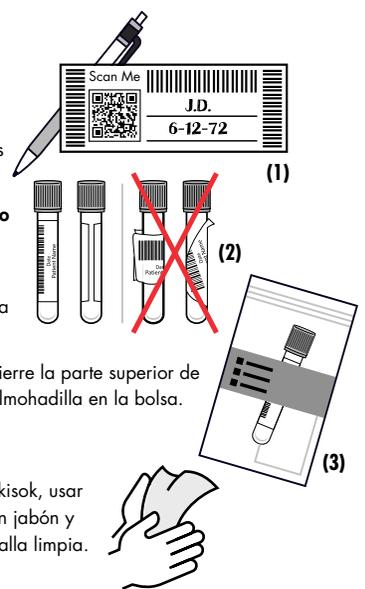


8 Manos limpias

Antes de devolver el espécimen recolectado a kisok, usar la toallita desinfectante o lavarse las manos con jabón y agua tibia por 20 segundos secándolos con toalla limpia.

9 Entrega de la muestra

DEBE entregar la muestra el mismo día en que la toma.

- Deposite la bolsa de muestras con el **hisopo cerrado en el vial** en la ranura indicada en el quiosco.

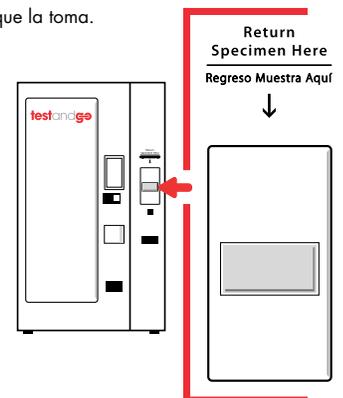

RECIBIRÁ UN MENSAJE DE TEXTO O UN CORREO ELECTRÓNICO CUANDO LOS RESULTADOS ESTÉN LISTOS. SI NO RECIBE SUS RESULTADOS, LLAME AL 800-402-0000 PARA OBTENER AYUDA.

ADVERTENCIAS:

- Para evitar lesiones, use solo los componentes provistos en el kit para tomar una muestra y no use el hisopo si el sello del paquete está roto.
- No haga la prueba a niños menores de 2 años.
- Este producto no ha sido autorizado por la FDA, pero ha sido aprobado para uso de emergencias (EUA, por sus siglas en inglés).
- Se autorizó este producto exclusivamente para la recolección y el mantenimiento de muestras nasales anterior, como ayuda en la detección del ácido nucleico del SARS-CoV-2, pero de ningún otro virus o patógeno.
- El uso de emergencia de este producto solo está autorizado por la duración de la declaración de que existen circunstancias que justifican la autorización del uso de emergencia de dispositivos médicos, según la Sección 564(b)(1) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, sección 360bbb-3(b)(1) del Título 21 del USC, a menos que se dé por finalizada la declaración o se revoque la autorización antes de que eso ocurra.

LEER DETENIDAMENTE:

Busque atención médica inmediata de un profesional sanitario si está gravemente enfermo y NO espere a tener el resultado de esta prueba. Llame al 911 si tiene una emergencia médica. Los signos de enfermedad grave incluyen falta importante de aire o respiración dificultosa, tos con sangre, dolor en el pecho, latidos irregulares, vómitos o diarrea persistentes.

Este kit se fabricó para Audere (healthpulse.now.org).